



# دستورالعمل تست با دستگاه تشخیصی CDP

سیستم شناسایی مارجین‌های داخلی آلوده به سلول‌های پیش سرطانی/سرطانی به صورت بی‌درنگ در حین عمل جراحی پستان

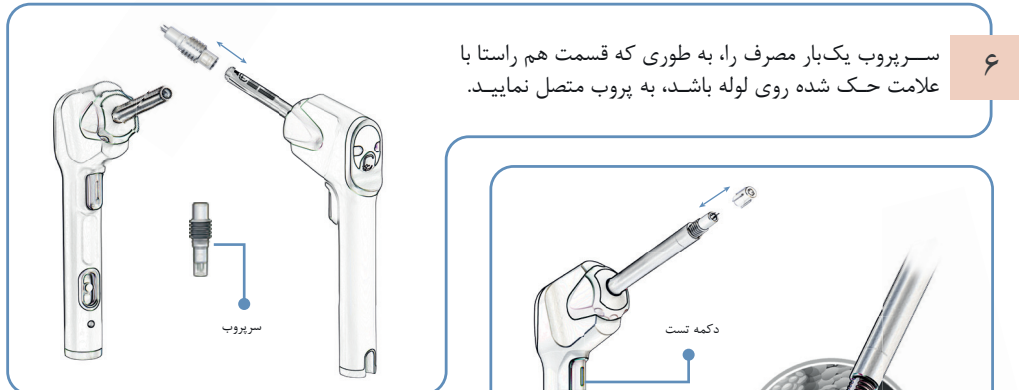


۶ سرپروب یک‌بار مصرف را، به طوری که قسمت هم راستا با علامت حک شده روی لوله باشد، به پروب متصل نمایید.

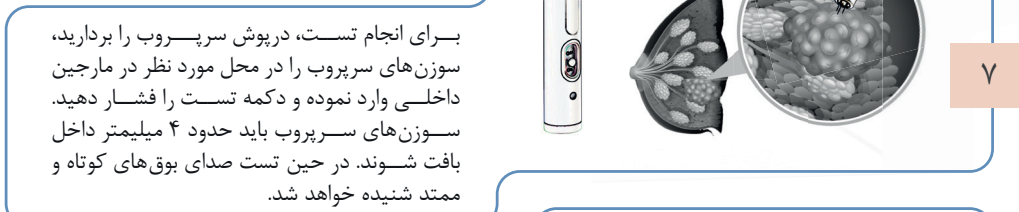


۷ برای انجام تست، درپوش سرپروب را بردارید، سوزن‌های سرپروب را در محل مورد نظر در مارجین داخلی وارد نموده و دکمه تست را فشار دهید. سوزن‌های سرپروب باید حدود ۴ میلی‌متر داخل بافت شوند. در حین تست صدای بوق‌های کوتاه و ممتد شنیده خواهد شد.




۸ بعد از حدود ۲۰ ثانیه نتیجه (قرمز مثبت)، زرد (مشکوک) و یا سبز (منفی)) بر روی صفحه ظاهر شده و همزمان صدای مختص آن شنیده خواهد شد.

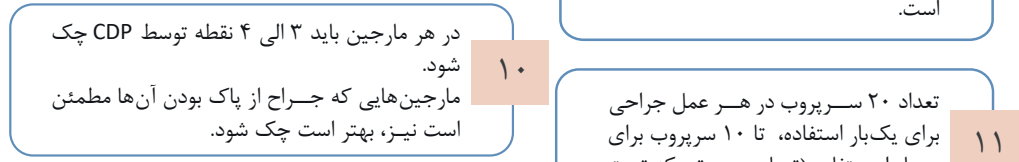

۹ هر نقطه از بافت فقط یک‌بار و با یک سرپروب جدید تست گرفته شود. تست مجدد روی یک lesion، چه با همان سرپروب و چه با سرپروب جدید، فاقد اعتبار است.

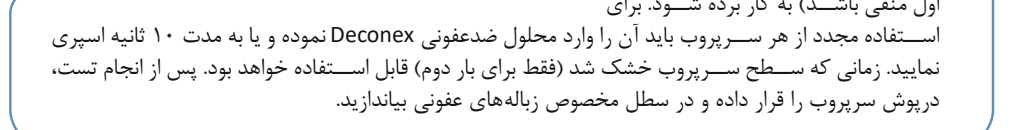

۱۰ در هر مارجین باید ۳ الی ۴ نقطه توسط CDP چک شود. مارجین‌هایی که جراح از پاک بودن آن‌ها مطمئن است نیز، بهتر است چک شود.

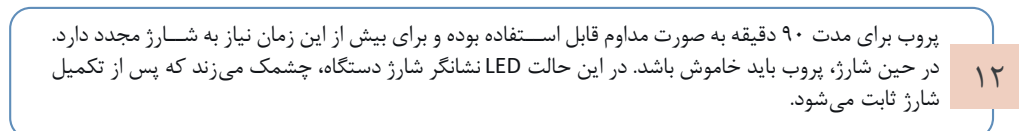


۱۱ تعداد ۲۰ سرپروب در هر عمل جراحی برای یک‌بار استفاده، تا ۱۰ سرپروب برای دو بار استفاده (تنها در صورتی که تست اول منفی باشد) به کار برده شود. برای استفاده مجدد از هر سرپروب باید آن را وارد محلول ضدعفونی Deconex نموده و یا به مدت ۱۰ ثانیه اسپری نمایید. زمانی که سطح سرپروب خشک شد (فقط برای بار دوم) قابل استفاده خواهد بود. پس از انجام تست، درپوش سرپروب را قرار داده و در سطل مخصوص زباله‌های عفونی بیاندازید.




۱۲ پروب برای مدت ۹۰ دقیقه به صورت مداوم قابل استفاده بوده و برای بیش از این زمان نیاز به شارژ مجدد دارد. در حین شارژ، پروب باید خاموش باشد. در این حالت LED نشانگر شارژ دستگاه، چشمک می‌زند که پس از تکمیل شارژ ثابت می‌شود.




۱ دستگاه را به برق متصل کرده و به وسیله کلید ON/OFF، دستگاه را روشن کنید. LED مربوط به لوگوی شرکت (آرم) در زیر مانیتور روشن می‌شود.

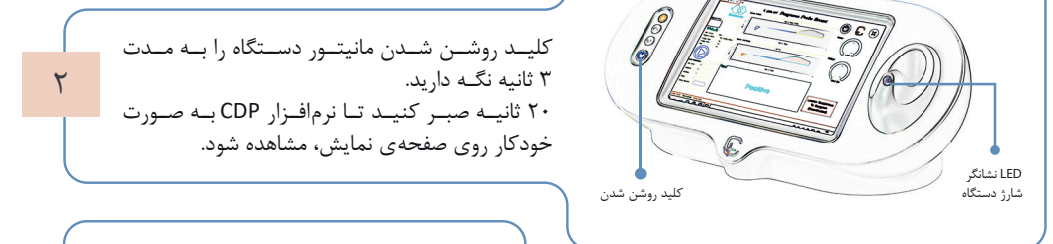

۲ کلید روشن شدن مانیتور دستگاه را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. ۲۰ ثانیه صبر کنید تا نرم‌افزار CDP به صورت خودکار روی صفحه‌ی نمایش، مشاهده شود.

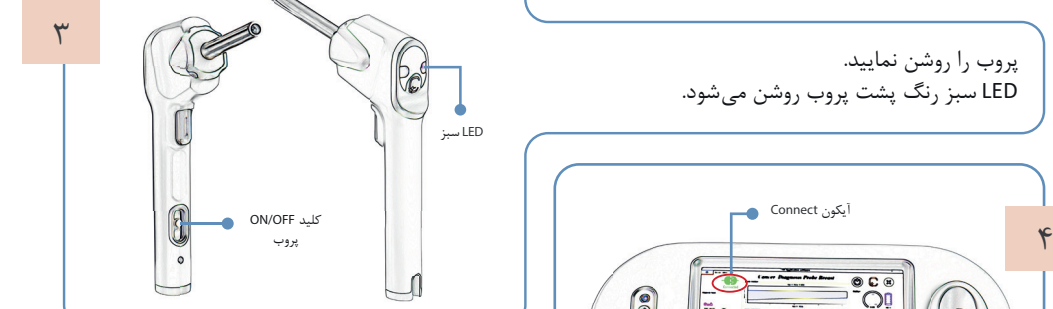

۳ پروب را روشن نمایید. LED سبز رنگ پشت پروب روشن می‌شود.

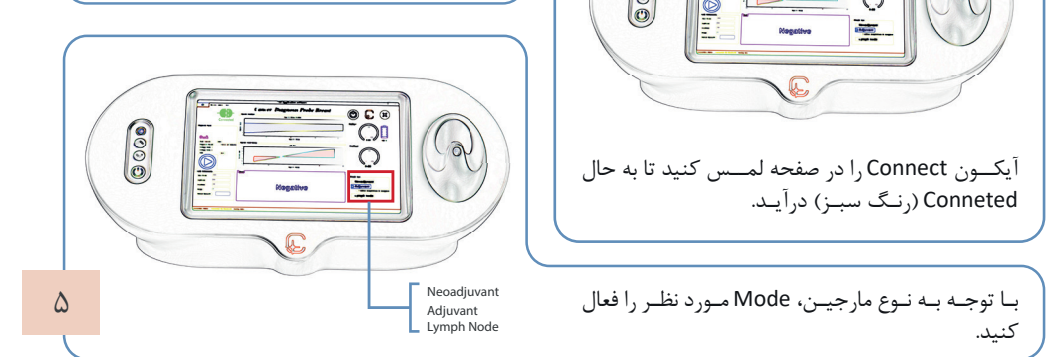

۴ آیکن Connect را در صفحه لمس کنید تا به حال Conncted (رنگ سبز) درآید.

با توجه به نوع مارجین، Mode مورد نظر را فعال کنید.